



Гемостатическое средство
с антимикробными свойствами
gemax.pro

GEMAX- гемостатическое средство в виде полимерного раствора по вязкости близкое к воде



ООО «МИКСРЕАЛИТИ»


Состав




1% или 3% водный раствор
полимеров акриловой
кислоты с металлами.



Производится из
отечественного сырья.

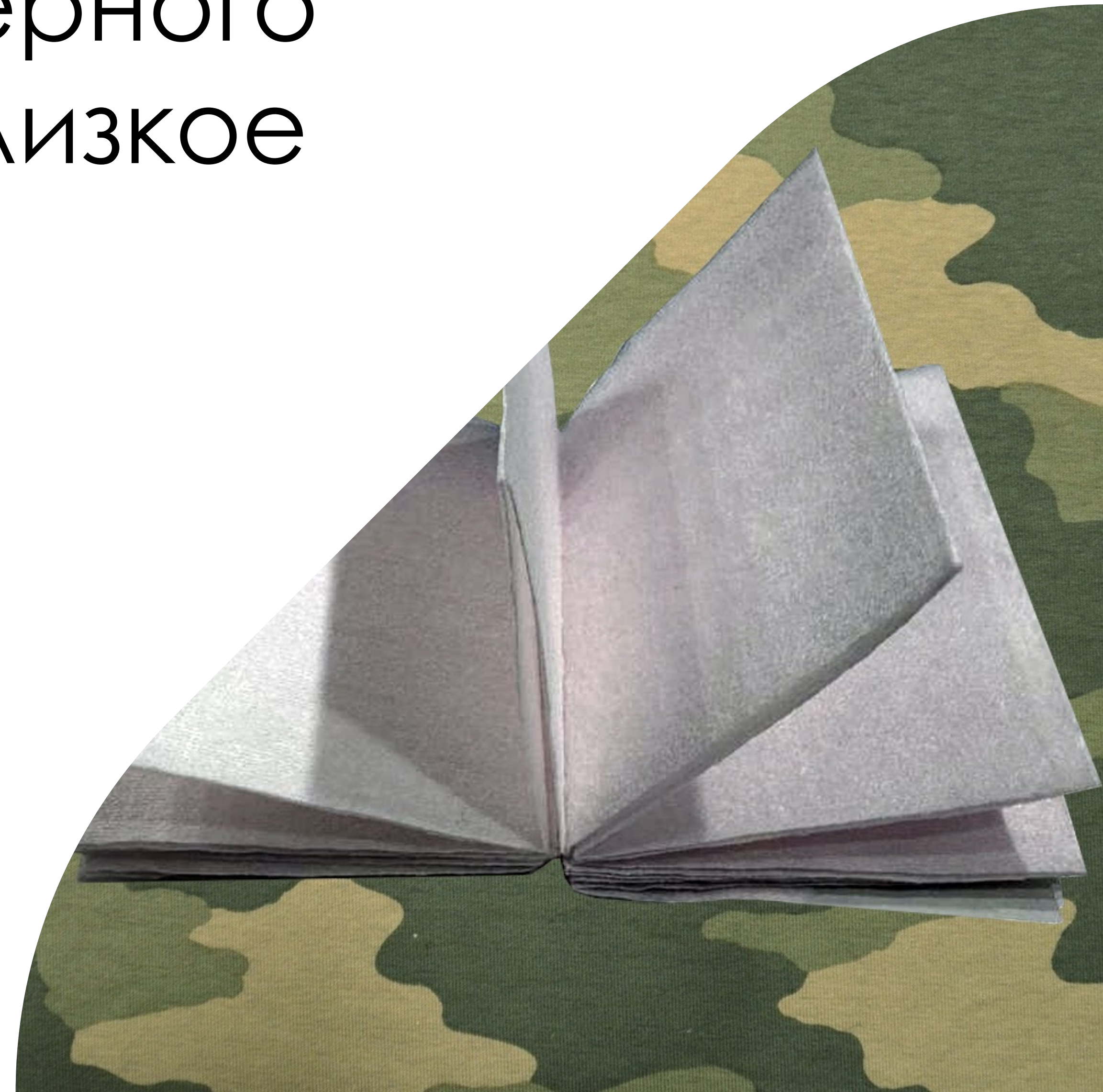


Преимущества

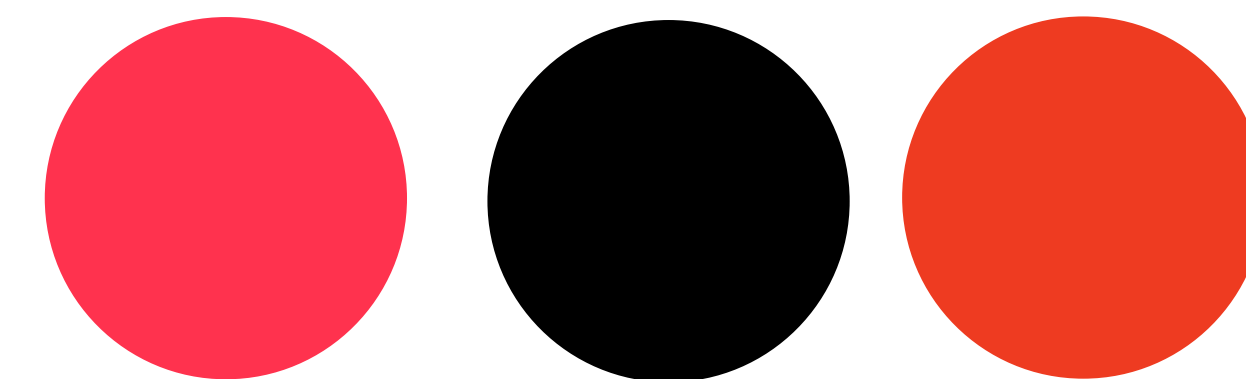

- Действует местно, не проникает в системный кровоток.
- При взаимодействии с белками плазмы крови (главным образом с альбумином) формирует полимерный комплекс (полиакриловая матричная структура, связанная с молекулами альбумина). Такая структура упаковывается в несколько микрослоев, создавая прочную полиметакрилатную пленку на поверхности раны. В дальнейшем поверхностная полимерная замещается фибрином. При образовании полимерного комплекса наступает гемостаз. Полиметакрилатная пленка биодеградирует естественным путем в течение суток.
- Бактерицидный эффект проявляется в отношении большинства известных грамположительных и грамотрицательных бактерий, таких как *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Moraxella spp.*, и других, а также грибковой флоры (*Candida spp.*, и др.) и к устойчивым внутрибольничным штаммам бактерий. Препятствует развитию раневой инфекции. Раны заживают первичным натяжением шва без нагноений.



ООО «МИКСРЕАЛИТИ»

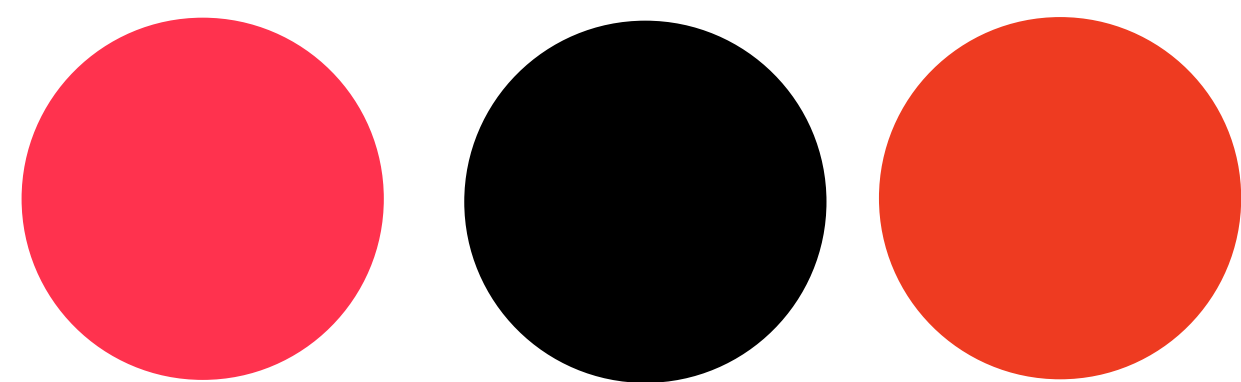

Гемостатическое действие «GEMAX»

Полимерный комплекс средства с кровью с образованием сгустка крови. (в соседней пробирке кровь в дистиллированной воде не образует сгусток)



Преимущества

- не содержит компонентов животного происхождения
- не проявляет раздражающего, прижигающего, вяжущего, токсического, резорбтивного или аллергенного действия
- не оказывает побочного действия на ткани, не вызывает ожоги
- не всасывается и не проникает в системный кровоток
- не влияет на функцию гемостаза в общем кровотоке
- не приводит к тромбообразованию, повышению СОЭ

Может применяться в различных формах:

- Жидкость гемостатическая
- Салфетка 18*20 см
- Гель гемостатический
- Гель противожоговый
- Гель гемостатический



Преимущества

Может применяться
в различных формах:

- Жидкость гемостатическая
- Жидкость гемостатическая
- Салфетка 18*20 см
- Гель гемостатический
- Гель противоожоговый





Конкуренты

Прямых аналогов нет

Аналогичные по функционалу z-сложенные бинты производятся под маркой:

- Celox

Действие продукции конкурентов основано на **хитозане**, как правило импортного производства.

Продукция GEMAX производится с использованием полимерного раствора, по вязкости близкого к воде.

При взаимодействии с белками плазмы крови формирует полимерный комплекс (полиакриловая матричная структура связанная с молекулами альбумина)





Приглашаем к сотрудничеству

Контакты:

Телефон: +7(985)430-76-60

Телефон: +7(985)113-46-00

Email: info@gemax.pro

Сайт: gemax.pro

Изготовитель:

Изготовитель: ООО «**МИКСРЕАЛИТИ**»

ОГРН 1165018051846 ИНН 5018184647

